
ACRYLSTAINS DE PPI

SISTEMA DE COLOR

DESCRIPCIÓN:

AcrylStains es un innovador sistema de color para el tinto permanente de prótesis dentales y oculares. Ideal para crear gran variedad de efectos en dientes, ojos, y cualquier otro objeto de base acrílica. AcrylStains es muy sencillo de usar ya que el amplio rango de colores incluidos hace las mezclas más fáciles y más naturales. El largo tiempo de trabajo y la durabilidad del resultado final son muy superiores a cualquier producto similar, haciendo de AcrylStains el sistema de pintado de prótesis dentales y oculares más usado en el mundo.

INSTRUCCIONES:

1. Usar en un lugar bien ventilado y llevar siempre la protección adecuada: guantes, mascarilla y gafas. Recomendamos usar mascarillas contra gases y vapores orgánicos.
2. NUNCA usar AcrylStains directamente en la boca o en los ojos. AcrylStains está diseñado para ser usado sobre prótesis dentales y oculares artificiales.
3. AcrylStains está diseñado para ser usado en capas y veladuras, levantando los colores poco a poco a medida que las capas van secando y se añaden nuevas.
4. Si AcrylStains se vuelve espeso se puede diluir con el diluyente incluido en la caja.
5. AcrylStains viene en una gran variedad de colores, pero se pueden mezclar entre ellos para generar la combinación deseada.
6. Trabajar de los colores más claros a los más oscuros es más sencillo que hacerlo al revés.
7. Se puede sellar el resultado final con 2 ó 3 capas de sellador, dependiendo del nivel de brillo que se quiera obtener.
8. Una vez terminado hay que dejar secar bien antes de usarlo en la boca. 1 hora o esperar a que deje de oler suele ser una buena medida de tiempo. Además hay que lavar bien la prótesis antes de usarla.
9. Asegúrate de cerrar bien todos los botes de AcrylStains después de su uso para evitar su evaporación.

ACRYLSTAINS DE PPI

SISTEMA DE COLOR

PREGUNTAS FRECUENTES:

Pregunta: ¿Por qué usar AcrylStains?

Respuesta: AcrylStains es ideal para crear gran variedad de efectos en dientes, ojos, y cualquier otro objeto de base acrílica. AcrylStains es muy sencillo de usar ya que el amplio rango de colores incluidos hace las mezclas más fáciles y más naturales. El largo tiempo de trabajo y la durabilidad del resultado final son muy superiores a cualquier producto similar, haciendo de AcrylStains el sistema de pintado de prótesis dentales y oculares más usado en el mundo. evitar su evaporación.

Pregunta: ¿Puedo pintar con AcrylStains directamente en la boca u ojos?

Respuesta: NO. AcrylSatins tiene una base solvente y no es para uso cosmético. No es seguro usar AcrylStains directamente en la boca. Una vez que se haya pintado la prótesis, hay que esperar un tiempo para que seque completamente antes de usar en una boca.

Pregunta: ¿Qué puedo usar en la boca directamente, entonces?

Respuesta: PPI tiene una línea para eso llamada PegWorks que se puede usar en conjunción con AcrylStains.

Pregunta: ¿Puedo usar AcrylStains con otros productos dentales como Minute Stains?

Respuesta: SI. AcrylStains es compatible con la mayoría de sistemas del mercado.

Pregunta: Mi AcrylStains se está gelificando.

Respuesta: AcrylSatins puede evolucionar con el tiempo o la temperatura hacia un estado de gel o espesarse. Usar unas gotas del diluyente incluido en la caja extenderá notablemente la vida del producto.